


Accu-Chek® TenderLink Εκπαιδευτικό διάγραμμα

Το σετ έγχυσης Accu-Chek TenderLink προορίζεται για υποδόρια έγχυση ινσουλίνης.




Επιλέξτε ένα σημείο μακριά από τη μέση, τα κόκκαλα, από συλώδη ιστό, από τον αφαλό και από σημεία έγχυσης που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.


1) Καθαρίστε τα χέρια σας και 2) το σημείο έγχυσης σύμφωνα με τις οδηγίες του επαγγελματία υγείας που σας φροντίζει. Αφήστε το σημείο έγχυσης να στεγνώσει πριν εισάγετε το Accu-Chek TenderLink.

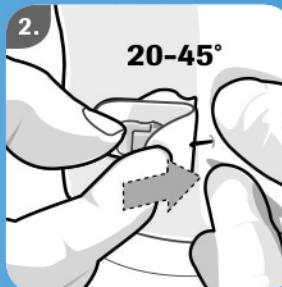

Αφαιρέστε την μπροστινή πλευρά του αυτοκόλλητου επιθέματος από το αυτοκόλλητο και τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βελόνα εισαγωγής. Πιέστε το Accu-Chek Tenderlink ανάμεσα στον αντίκειρα και το μεσαίο δάχτυλο του ενός χεριού πίσω από τους πλαινούς συνδετήρες και τραβήξτε πίσω την άκρη του αυτοκόλλητου με το δείκτη σας. Εισάγετε τη βελόνα εισαγωγής στο δέρμα υπό γωνία 20-45°, προχωρώντας γρήγορα και με μία κίνηση.

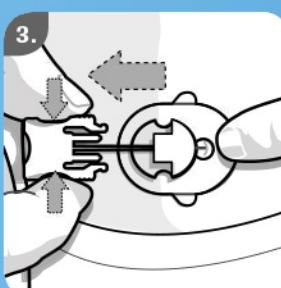


Πιέστε το αυτοκόλλητο σταθερά πάνω στο σημείο έγχυσης και βεβαιωθείτε ότι εφάπτεται καλά με το δέρμα. Τοποθετήστε το ένα δάχτυλο μπροστά από το παράθυρο ελέγχου για να το σταθεροποιήσετε. Πιέστε μαζί ταυτόχρονα τους πλαίνοντας συνδετήρες της βελόνας εισαγωγής απαλά και συγχρόνως τραβήξτε τη βελόνα εισαγωγής από το δέρμα.

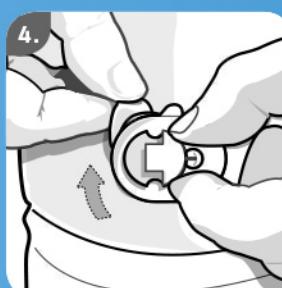

Αφαιρέστε την πίσω πλευρά του αυτοκόλλητου επιθέματος από το αυτοκόλλητο και πιέστε το αυτοκόλλητο σταθερά επάνω στο δέρμα.



Συνδέστε το σύνδεσμο luer-lock στον προσαρμογέα της αντλίας. Κάντε τηλίρωση σετ μεταφοράς (χειμίστε) του Accu-Chek TenderLink σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της αντλίας μέχρι το φάρμακο να στάξει από το άκρο της βελόνας του συνδέσμου. Μην αφήνετε φυσαλίδες αέρα μέσα στην αμπούλα και στο σετ μεταφοράς ινσουλίνης.

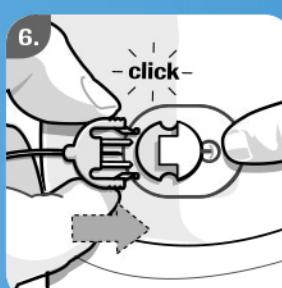

Συνδέστε το σετ μεταφοράς στο νέο σετ κεφαλής που έχει εισαχθεί, έχοντας την πλευρά που προεξέχει προς τα πάνω. Κατά τη σύνδεση πρέπει να ακουστεί ένα «κλικ», για να ασφαλίσει η σύνδεση. Γεμίστε τον κενό χώρο του περιβλήματος του καθετήρα με μία δόση bolus 0,7 μονάδων ινσουλίνης U-100 (περίπου 7 μl). Ξεκινήστε την έγχυση ινσουλίνης με την αντλία.

Για αναλυτικές οδηγίες και σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

Experience what's possible.

Τα εμπορικά σήματα ACCU-CHEK και ACCU-CHEK FLEXLINK ανήκουν στη Roche.
© 2012 Roche Diagnostics

www.accu-check.gr
Roche Diagnostics (Hellas) A.E.
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Accu-Chek: 210 2703700
Δωρεάν γραμμή υποστήριξης (από σταθερό): 800 11 71000



ACCU-CHEK®